

set x30 mascherine facciali

Mascherina di
protezione con
doppio tessuto
Mask-Pro

15.655.90020.0



taglia **S**



junior



adulto



USO e RACCOMANDAZIONI

Lava la tua mascherina dopo ogni utilizzo
Lavati le mani con soluzione saponata e
idroalcolica prima di collocarla sul viso
Non muovere la mascherina ed evita di
toccarla
Cambia la tua mascherina ogni 4 ore
Lavaggio a macchina 35 gradi
Asciugare a macchina o stesa.

DESCRIZIONE

Valori ottenuti in analisi realizzate in laboratorio
omologate secondo normativa UNE-EN 14683 + AC:2019:
EFFICACIA DI FILTRAZIONE BATTERICA (BFE) 2 STRATI Valore:
+95 - UNITA' DI MISURA % TOLLERANZA + 90%
TRASPIRABILITA' (pressione differenziata) Valore 27,1+/- 3%
UNITA' DI MISURA pa/cm2 - Tolleranza + 60
RIUTILIZZABILE / LAVABILE Senza perdere nessuna delle
sue qualità per 88 lavaggi. Norma UNE-EN ISO 3758
Questo prodotto non è un presidio sanitario.



15.655.90020.0



x30/u



A FINE UTILIZZO

Buttare la mascherina nel
contenitore immondizia secco
per evitare contaminazioni alle
persone addette.

Fabbricata con tessuto impermeabile e antibatterico, protegge dall'acqua e respinge le micro gocce bloccandole sul tessuto esterno.
E' traspirante, comoda da mettere con elastici adattivi. Lavabile, riutilizzabile e rispettosa dell' ambiente. Realizzata con tessuto mask Pro
con certificazione OEKO - TEX Standard 100 · Omologato dall' istituto di ricerca tessile Aitex.